

## アンバーステッキ伸縮型 取扱説明書

この度は、当ステッキをお買い求め下さいまして誠にありがとうございます。

下記の取扱説明をお読みくださいまして、正しく御愛用くださいますようお願い申し上げます。

\*\*\*\*\*

**★この取扱説明書は大切に保存してください。★**

\*\*\*\*\*

### 【特徴】

握りが掌上に成形されていて、掌全体で体を支えることができます。

リウマチや片麻痺のある方にもご利用頂けます。

### 【寸法調整の方法】

プッシュボタン式による高さ調整が可能です。

1. 支柱側面の高さ調整用ボタンを指先で押し込みながら伸展棒を抜き差しして希望の高さに調整します。

2. 希望の高さに調整したら指を離しボタンを支柱側面から突出させます。

### 【正しい寸法の決め方】

◆ 杖先を 握り手と同じ側の足先 外約 20cm に置き、肘が 30～40 度屈曲した状態が適当な長さの目安です。

◆ 正しい寸法については医師や、各種療法士等の専門アドバイザーの方にご指導を仰いでください。(図 A 参照)

### 【製品の規格】

※全長は最下段寸法表示を参照してください。

### 【使用上の注意】

◆ 上記【正しい寸法の決め方】を参考に身体に合った寸法で御使用ください。

◆ 当杖は、『つえ』なしで自立歩行できる人が、より安定して歩行できるよう補助的に使用するものです。次の①②に該当する場合の使用には適しません(体重をかけすぎたりすると、かえって肩や手を痛めることもあるからです)。又、購入後、次のような状態になった場合は使用を停止すべきです。

① つえなしでは歩行できない方(手すりに伝わらなければ歩行できない方、介助者に手伝ってもらわなければ歩行できない方が含まれます。)

② リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩行できない方。ただし、医師などの指導の下での使用は含みません。

◆ 不適當な寸法の杖を使用すると、正しく歩行できないばかりか、体に不都合が生じる場合が有りますので、歩行並びに取扱いには医師及び専門のアドバイザーの指導に従ってください。

◆ 握りにガタつきが出た場合や、掌を傷つけるような傷が付いた場合は使用を中止してください。

◆ 使用前・使用中も高さ調整ボタンが支柱側面から、きちんと突出していることを確認して歩行してください。

◆ パイプエンド部品がしっかりと嵌っている事を確認して歩行してください。外れていると伸展パイプに傷付きやすく破損の原因となります。又、高さ調整用ボタンの嵌合部分での音は通常発生する音ですが、パイプエンド部品が外れているとパイプの遊びが多くなり、高さ調整用ボタンの嵌合部分での音が大きく発生します。

◆ 支柱の真上に荷重が掛かるように握って使用してください。(裏面図 B 参照)

◆ その他、異常音や不都合が生じた場合は使用を直ちに中止して専門家に点検してもらってください。

◆ 先ゴムが破れたり摩耗したりしている場合は、サイズの合った新しい先ゴムと早めに交換してください。(先ゴムはきちんと底まで差し込んで装着してください。)

◆ 握りはナイロン樹脂製です。硬いものに当たると傷が付いたりしますので注意してください。又、60℃以上の温度で荷重が掛かると変形することがありますので夏場の自動車内に置いて直ぐの使用等にはご注意ください。又、ストーブ等の暖房器具のそばに置かないようにしてください。

◆ 濡れたり凍結した床一面・路面等滑りやすい場所での使用は、十分注意してください。

◆ 杖先が嵌まり込むような溝や窪みがある路面での使用は、杖の破損や、使用者の転倒につながりますので十分注意してください。

◆ 杖を倒すと、握り前面の反射板が割れたり外れたりすることがありますのでご注意ください。

◆ 用途以外(登山・護身用等)に使用しないでください。

◆ 1人専用の目的のもので、多人数で使用しないでください。

◆ 使用後の手入れは、乾燥させてきれいに清掃してしまってください。

但し、長時間使用しない場合は、高温直射日光を避けて保管してください。

全長：75～95cm 約 2.5cm 間隔 重量：約 350g

材質 握り：ナイロン 支柱：アルミ軽合金

寸法規格の数値はロットにより多少前後します。

原産国：イタリア

交換用先ゴムの内径：17mm φ (要座金) 標準の耐用年数 3年

☆伸展棒を抜き差しすると、伸展棒の支柱内部にあるブレ止め部品がボタン穴で削られ白いプラスチック屑が出る場合があります。



図 A

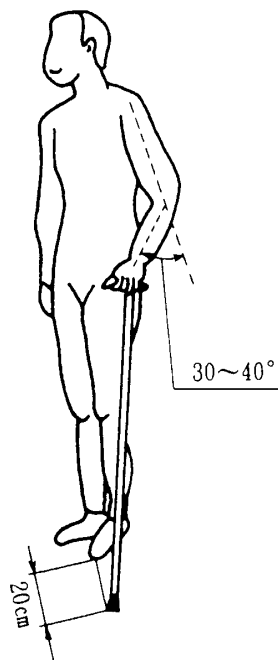


図 B

## 株式会社 赤 井

〒558-0011 大阪市住吉区荻田8丁目11番19号  
お問い合わせ、御相談はお客様相談室 06-6608-0562

### 保証規定

本製品は、厳密な検査に合格したものです。お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合は、本保証規定に従い故障箇所の無償修理をさせていただきますので、お買い上げの販売店に本書を添えてご依頼ください。修理は、部品の交換もしくは補修により行いますが、修理困難等の場合、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換することで対応させていただく場合があります。ただし、本製品の故障により生じるお客様の損害に対し当社は修理以外の責任を負いません。尚、保証期間内においても次の場合は有償修理となります。

1. 本保証書の提示がない場合。
2. 本書にお客様名、お買い上げ年月日、販売店名の記入がない場合、字句を書き替えられた場合。
3. ご使用上の誤りや不適切な取り扱い、不当な修理や改造による故障の場合。
4. お客様による運送または移動に際し、落下、衝撃等に起因する故障、損傷の場合。
5. 火災・地震・水害等の天災地災による故障損傷の場合。
6. 消耗部材を取り替える場合。(先ゴム・パイプ止め部品・高さ調整用部品)
7. 本保証は日本国内のみで有効です。(This warranty is valid only in Japan)

販売店様へのお願い：ご販売時に保証書の販売店名、販売日付を記入の上、保証書をお客様にお渡しください。記入なき場合には本保証書は無効となります。