

## ボタン伸縮杖 スリム 取扱説明書

この度は、当ステッキをお買い求め下さいまして誠にありがとうございます。

下記の取扱説明をお読みくださいまして、正しく御愛用くださいますようお願い申し上げます。

\*\*\*\*\*

この取扱説明書は大切に保存してください。

\*\*\*\*\*

### 【寸法調整の方法】

プッシュボタン式による高さ調整が可能です。

1. サレンサーを緩めます。
2. 支柱側面のボタンを指で強く押し込みながら伸展棒を抜き差しして高さ調整をします。
3. 希望の高さに調整したら、高さ調整ボタンが支柱側面からきちんと突出したことを確認します。
4. 調整後は、サレンサーをしっかり締めます。 (図 B 参照)

### 【正しい寸法の決め方】

- ◆ 杖先を 握り手と同じ側の足先 外約 20cm に置き、肘が 30～40 度屈曲した状態が適当な長さの目安です。
- ◆ 正しい寸法については医師や、各種療法士等の専門アドバイザーの方にご指導を仰いでください。(図 A 参照)

### 【製品の規格】

※全長は最下段寸法表示を参照してください。

### 【使用上の注意】 ⚠

- ◆ 当杖は、『つえ』なしで自立歩行できる人が、より安定して歩行できるよう補助的に使用するものです。次の①②に該当する場合の使用には適しません(体重をかけすぎたりすると、かえって肩や手を痛めることもあるからです)。又、購入後、次のような状態になった場合は使用を停止すべきです。
  - ① 杖なしでは歩行できない方(手すりに伝わらなければ歩行できない方、介助者に手伝ってもらわなければ歩行できない方が含まれます。)
  - ② リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩行できない方。ただし、医師などの指導の下での使用は含みません。
- ◆ 上記【正しい寸法の決め方】を参考に身体に合った寸法で御使用ください。不適当な寸法の杖を使用すると、正しく歩行できないばかりか、体に不都合が生じる場合がありますので、歩行並びに取扱いには医師及び専門のアドバイザーの指導に従ってください。
- ◆ 握りにガタつきが有る場合は使用を中止してください。
- ◆ 使用前・使用中も高さ調整ボタンが支柱側面からきちんと突出していることを確認して歩行してください。
- ◆ サレンサーがしっかりと絞まっている事を確認して歩行してください。
- ◆ 支柱の真上に荷重が掛かるように握って使用してください。
- ◆ その他、異常音や不都合が生じた場合は使用を直ちに中止して専門家に点検してもらってください。
- ◆ 先ゴムが破れたり摩耗したりしている場合は、サイズの合った新しい先ゴムと早めに交換してください。(先ゴムはきちんと底まで差し込んで装着してください。)
- ◆ 濡れたり凍結した床面・路面等滑りやすい場所での使用は、十分注意してください。
- ◆ 杖先が嵌まり込むような溝や窪みがある路面での使用は、杖の破損や、使用者の転倒につながりますので十分注意してください。
- ◆ 握りは天然木ですので、杖を倒すと傷ついたり、部分的に割れたりすることがありますのでご注意ください。
- ◆ 用途以外(登山・護身用等)に使用しないでください。
- ◆ 1人専用の目的のもので、多人数で使用しないでください。
- ◆ 使用後の手入れは、乾燥させてきれいに清掃してしまってください。但し、長時間使用しない場合は、高温直射日光を避けて保管してください。

## 株式会社 赤井

〒558-0011 大阪市住吉区荻田8丁目11番19号

お問い合わせ、御相談はお客様相談室 06-6608-0562

全長：76～99cm 約 2.5cm 間隔で調整可能  
重量：310g  
材質 握り：天然木 支柱：アルミ軽合金  
原産国：台湾

交換用先ゴムの内径：15mm φ (要座金)

