

コモドチェア-STD 取扱説明書

この度は、当製品をお買い求め下さいまして誠にありがとうございます。

下記の取扱説明をお読みくださいまして、正しく御愛用くださいますようお願い申し上げます。

この取扱説明書は大切に保存してください。

【寸法調整の方法】

プッシュボタン式による高さ調整が可能です。

1. 脚部側面のボタンを指で強く押し込みながら伸展パイプを抜き差しして4脚同じ高さに調整をします。
2. 希望の高さに調整したら、高さ調整ボタンが脚部側面からきちんと突出したことを確認します。

【組み立て】

同梱包の背部パイプを本体フレームに付属の蝶ナットとボルトで固定します。

【製品の規格】

※全長は最下段寸法表示を参照してください。

【使用上の注意】 ⚠

- ◆ 上記【寸法調整の方法】を参考に身体に合った寸法で御使用ください。
- ◆ 4脚同じ高さでご使用ください。
- ◆ 使用前、高さ調整ボタンが支柱側面からきちんと突出していることを確認して使用してください。
- ◆ 平面でのご使用をお願いします。平面以外で使用しますと、フレームが歪み、全体がガタつくことになり耐久力が低下します。
- ◆ 当製品は、自立できる人が使用するものです。自立できない方が介助者なしで使用しないでください。
- ◆ フレームに体重をかける際、急激に体重をかけないようにしてください。トイレのフレームが歪んだり、トイレがズレたり、トイレが転倒したりして使用者が転倒する恐れがあるからです。
- ◆ 背部パイプは、便座ふたの支持が主な目的ですので、体重を掛けてもたれないようにしてください。
- ◆ フレームにガタつきが有る場合は使用を中止してください。
- ◆ その他、異常音や不都合が生じた場合は使用を直ちに中止して専門家に点検してもらってください。
- ◆ 脚部先ゴムが破れたり摩耗したりしている場合は、サイズの合った新しい先ゴムと早めに交換してください。(先ゴムはきちんと底まで差し込んで装着してください。) 先ゴムは、水抜き穴の開いているものをご使用ください。
- ◆ 便座、便座蓋、バケツ及びバケツ蓋の消毒にアルコールは使用しないで下さい。長期にわたって使用すると白濁劣化します。
- ◆ 浴室内での使用は可能ですが、使用後は、腐蝕防止のため出来るだけ乾燥させるようにしてください。
- ◆ 用途以外(踏み台等)に使用しないでください。

株式会社 赤井

〒558-0011 大阪市住吉区苅田8丁目11番19号

お問い合わせ、御相談はお客様相談室 06-6608-0562

必要床面：幅 60cm×奥行 51cm
便座高さ：36.5～44cm 約 2.5cm 間隔で調整可能
便座：幅 35cm×奥行 37.5cm
フレームの内幅：48cm
重量：4.9Kg
材質 握り：塩化ビニールスポンジ
フレーム：アルミ軽合金
原産国：台湾

交換用先ゴムの内径：28mm φ (要座金・水抜き穴)