

アイススティック（冰雪上用歩行補助杖） 取扱説明書

長さの調整

サイレンサーを緩め、長さ調整ボタンを押し込みながら支柱を出し入れして調整します。

長さの調整の目安は、杖の先を握った手と同じ側の足先前方 20cm に置き、肘がやや曲がる位ですが、個人差がありますので専門のアドバイザーに指導を仰いでください。

調整後、ボタンがボタン穴からキッチリと突出している事を確認し、サイレンサーを締めてください。

使用上の注意

冰雪上以外では石突きを出して使用しないで下さい。

石突きを出して使用する場合、石突き操作レバーは、窪みの位置まで廻してご使用下さい。

冰雪上でのご使用時は、滑りやすいので十分注意してください。

体にあった長さに調整して使用してください。

使用の前に、長さ調整ボタンがきちりと突出している事を確認してください。

先ゴムはきちんと底まで差し込んで装着してください。

先ゴムが摩滅した場合は、新しいサイズのあった先ゴムと交換してください。


正しい寸法に調整されずに使用すると、正しく歩行する事が出来ないばかりか、体に不都合が生じる可能性がありますので、歩行並びに取り扱いについては医師及び専門のアドバイザーの指導に従ってください。

異常音や不都合が生じた場合は、使用を直ちに中止して専門家に点検してもらってください。

1人専用の目的のためのものですので、多人数で使用しないでください

本来の目的以外に使用しないでください。

本取扱説明書は保存しておいてください。

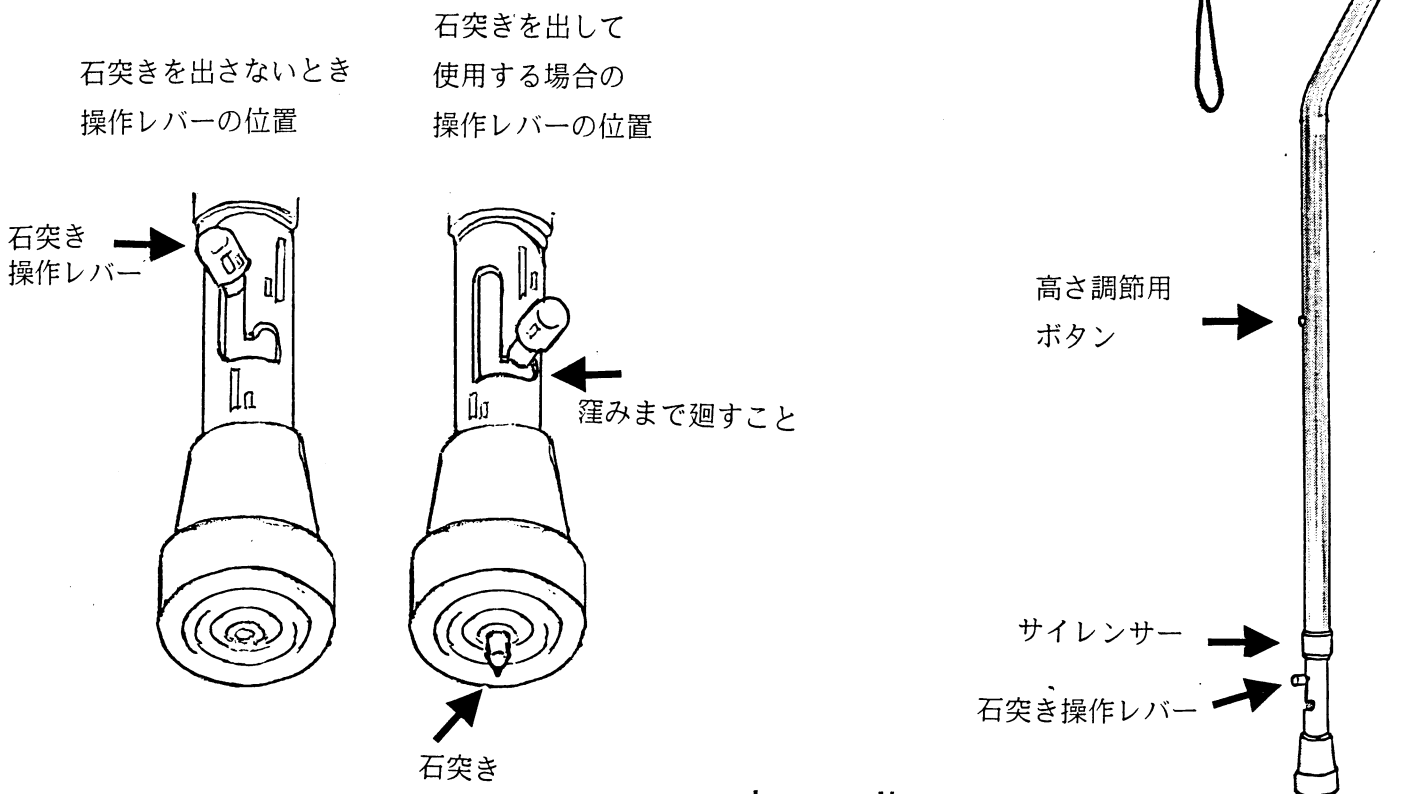

株式会社 赤 井

大阪市住吉区菟田 8-11-19