

# ロフトランドクラッチ固定型 取扱説明書

この度は、当杖をお買い求め下さいまして誠にありがとうございます。

下記の取扱説明をお読みくださいまして、正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。

\*\*\*\*\*

**★この取扱説明書は大切に保存してください。★**

\*\*\*\*\*

## 【寸法調整の方法】

握り高さはパイプカッターか金のこぎりで切断して調整します。

切断はパイプ断面がパイプ側面に直角になるようバリがでないようきれいに切断してください。

肘受け高さはプッシュボタン式による高さ調整ができます。

1. 肘受け高さは肘受けパイプ用の支柱側面のボタンを指で強く押し込みながら肘受け高さを調整します。
2. 希望の高さに調整したら、高さ調整ボタンが支柱側面からきちんと突出したことを確認します。

## 【正しい寸法の決め方】

- ◆ 杖の先端が握り手と同じ側の足先 外前方約 20cm に置き、肘が 30～40 度屈曲した状態が適当な長さの目安です。
- ◆ 肘受けの長さは、肘関節の運動の邪魔にならない範囲で出来るだけ伸ばして使用してください。
- ◆ 正しい寸法については医師や、各種療法士等の専門アドバイザーの方にご指導を仰いでください。（裏面図 A 参照）
- ◆ 肘受けが狭い場合、肘受けを軸と共に杖本体から抜き取り、約 80℃の熱湯に暫く浸け、肘受け樹脂を柔らかくして適当な大きさに広げ、広げた状態で冷水に浸ける等冷却し肘受けの形を固定させます。この作業をするときは、熱湯や熱くなった肘受けで火傷をしないように十分注意して作業してください。

## 【歩行方法】

正しい歩行方法については医師や、各種療法士等の専門アドバイザーの方にご指導を仰いでください。

基本的には、2 本 1 組にて使用することが望ましいです。

## 【製品の規格】

※寸法規格は最下段寸法表示を参照してください。

## 【使用上の注意】 ⚠

- ◆ 当杖の使用が適当であるかを医師等の専門家により判断された方のみが使用できます。 身体機能に適合しない無理な使用は転倒や身体の故障の原因になりますので、必ず専門家の判断により使用を決定してください。
- ◆ 上記【正しい寸法の決め方】を参考に身体に合った寸法でご使用ください。
- ◆ 不適當な寸法の杖を使用すると、正しく歩行できないばかりか、体に不都合が生じる場合が有りますので、歩行並びに取扱いには医師及び専門のアドバイザーの指導に従ってください。
- ◆ 握り部分にガタつきが有る場合は使用を中止してください。
- ◆ 使用前・使用中も肘受け高さ調整用ボタンが支柱側面からきちんと突出していることを確認して歩行してください。
- ◆ その他、異常音や不都合が生じた場合は使用を直ちに中止して専門家に点検してもらってください。
- ◆ 支柱が折れたり曲がったりした場合は使用を中止してください。
- ◆ 先ゴムが破れたり摩耗したりしている場合は、サイズの合った新しい先ゴムと早めに交換してください。又、先ゴムはきちんと底まで差し込んで装着してください。
- ◆ 濡れたり凍結した床面・路面等滑りやすい場所での使用は、十分注意してください。
- ◆ 握りや肘受けは 60℃以上の温度で荷重が掛かると変形することがありますので夏場の自動車内に置いて直ぐの使用等にはご注意ください。又、暖房器具のそばに置かないこと。
- ◆ 用途以外(登山・護身用等)に使用しないでください。
- ◆ 長時間使用しない場合は、高温直射日光を避けて保管してください。


握り高さ：最長 99cm 切断により調整 肘受高さ：16～21cm 重量：約 550g

寸法規格の数値は㊦により多少前後します。

材質 握り：ナイロン 支柱：アルミ軽合金

肘受け：塩化ビニール

交換用先ゴムの内径：1 インチ φ（要座金）

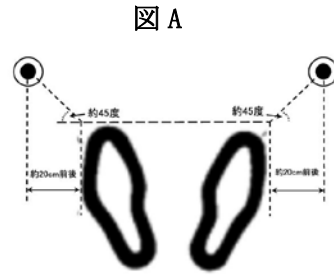

## 株式会社 赤 井

〒558-0011 大阪市住吉区苅田8丁目11番19号  
お問い合わせ、御相談はお客様相談室 06-6608-0562

### 保 証 規 定

本製品は、厳密な検査に合格したものです。お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合は、本保証規定に従い故障箇所の無償修理をさせていただきますので、お買い上げの販売店に本書を添えてご依頼ください。修理は、部品の交換もしくは補修により行いますが、修理困難等の場合、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換することで対応させていただく場合があります。ただし、本製品の故障により生じるお客様の損害に対し当社は修理以外の責任を負いません。

尚、保証期間内においても次の場合は有償修理となります。

1. 本保証書の提示がない場合。
2. 本書にお客様名、お買い上げ年月日、販売店名の記入がない場合、字句を書き替えられた場合。
3. ご使用上の誤りや不適切な取り扱い、不当な修理や改造による故障の場合。
4. お客様による運送または移動に際し、落下、衝撃等に起因する故障、損傷の場合。
5. 火災・地震・水害等の天災地災による故障損傷の場合。
6. 消耗部材を取り替える場合。(先ゴム・パイププレ止め部品・高さ調整部品・握り・肘受け)
7. 本保証は日本国内のみで有効です。(This warranty is valid only in Japan)

販売店様へのお願い：ご販売時に保証書の販売店名、販売日付を記入の上、保証書をお客様にお渡しください。記入なき場合には本保証書は無効になります。