

ボタン伸縮型アルミ松葉杖 取扱説明書

この度は、当杖をお買い求め下さいまして誠にありがとうございます。

下記の取扱説明をお読みくださいまして、正しく御愛用くださいますようお願い申し上げます。

この取扱説明書は大切に保存してください。

【特徴】

丈夫なアルミ軽合金製で安心してご使用いただけます。

全長の調整はボタン伸縮型で簡単に調節できます。

【寸法調整の方法】

全長

プッシュボタン(高さ調整ボタン)式による高さ調整が可能です。

1. セーフティナットを緩めます。
2. 伸展棒の高さ調整ボタンを指で強く押し込みながら伸展棒を抜き差しして高さ調整をします。
3. 希望の高さに調整したら、高さ調整ボタンが支柱側面からきちんとはみ出したことを確認します。
4. 調整後は、セーフティナットをしっかり締めます。(締め過ぎないようにする事) (裏面図 B 参照)

脇下

ボルトナット式による高さ調整です。

1. 蝶ナットを緩めボルトからワッシャと一緒に外し、ボルトを本体から抜き取ります。
2. 希望の高さに握り位置を決めてボルトを差し込み、ワッシャと共に蝶ナットで固定します。
3. 調整後は、蝶ナットをしっかり締めます。(締め過ぎないようにする事)

【正しい寸法の決め方】

- ◆ 松葉杖は1図の様なフィッティングポジションにて調整します。
- ◆ まず、患者が真っ直ぐ立った状態で杖に先ゴムを装着し、脇下に直接枕が触れないよう約5cm位すく様に全長を調整します。 図1参照
- ◆ 次に、握りの位置をいつも肘がやや曲る程度に調整します。 調整後の姿勢として、図2の様に爪先外側前方に杖先を置いて、やや前屈みになるような姿勢(突立ってしまわない様に)になる様に調整してください。

【製品の規格】

※全長は最下段寸法表示を参照してください。

【使用上の注意】

- ◆ 上記【正しい寸法の決め方】を参考に身体に合った寸法で御使用ください。
- ◆ 不適当な寸法の杖を使用すると、正しく歩行できないばかりか、体に不都合が生じる場合がありますので、歩行並びに取扱いには医師及び専門のアドバイザーの指導に従ってください。
- ◆ 松葉杖の部品に破損、ひび割れや割れが出た場合は廃棄して新しいものを使用してください。
- ◆ 使用前・使用中も高さ調整ボタンが支柱側面からきちんとはみ出していることを確認して歩行してください。
- ◆ 使用に当たっては伸展棒用高さ調整ボタンがきちんとはみ出して伸展棒がきちんとはみ固定されている事、セーフティナット及び各ボルトの蝶ナットが緩んでいない事を確認してから使用してください。
- ◆ もし緩んでいる場合はきちんとはみ締めしてから使用してください。
- ◆ 伸展棒用セーフティナットは、ぶれ止めと防音用の機能しかありませんので、セーフティナットだけでの高さ調整維持大変危険ですので止めてください。
- ◆ 脇パッドや握りパッドは消耗品です。劣化した場合は交換してください。(経時変化でも劣化します。)
- ◆ 杖の先ゴムはきちんとはみ装着して使用してください。
- ◆ 先ゴムは消耗品です。摩耗している場合は、新しい正しいサイズの先ゴムを装着してください。
- ◆ 寸法を調整する場合、部品をなくさないよう注意してください。組み立てる場合は各部品を省略しないで組み立ててください。
- ◆ 濡れたりして滑りやすい床面、路面を歩行する場合は充分気を付けて歩行してください。
- ◆ 濡れ面を歩行すると、ゴムの跡形が床面に付着する場合がありますので注意してください。
- ◆ 先ゴムには油を付けないようにしてください。
- ◆ 寸法が正しく調整されないと正しい歩行が出来ないばかりか体によくないことが起る可能性が出てきますので寸法・歩行方法等は医師や専門アドバイザーの方に、正しい歩行方法を指導して頂いてください。
- ◆ 貸し出しされる場合は特に安全を確認しフィッティングに留意してください。
- ◆ 松葉杖の標準的な耐用年数は使用開始から約4年です。
- ◆ 用途以外(登山・護身用等)に使用しないでください。
- ◆ 1人専用が望ましい使用方法ですが、貸与等される場合は使用者自身の始業点検と、貸与業者の定期点検を怠らないように使用してください。
- ◆ 使用後の手入れは、乾燥させてきれいに清掃してしまってください。但し、長時間使用しない場合は、高温直射日光を避けて保管してください。

大

全長：124～144cm 約2.5cm 間隔
脇下：36.5～51.5cm
重量：約1920g

中

全長：144～134cm 約2.5cm 間隔
脇下：36.5～51.5cm
重量：約19200g

小

全長：96～116cm 約2.5cm 間隔
脇下：23.5～38.5cm
重量：約1680g

材質 本体：アルミ軽合金

原産国：台湾

図1


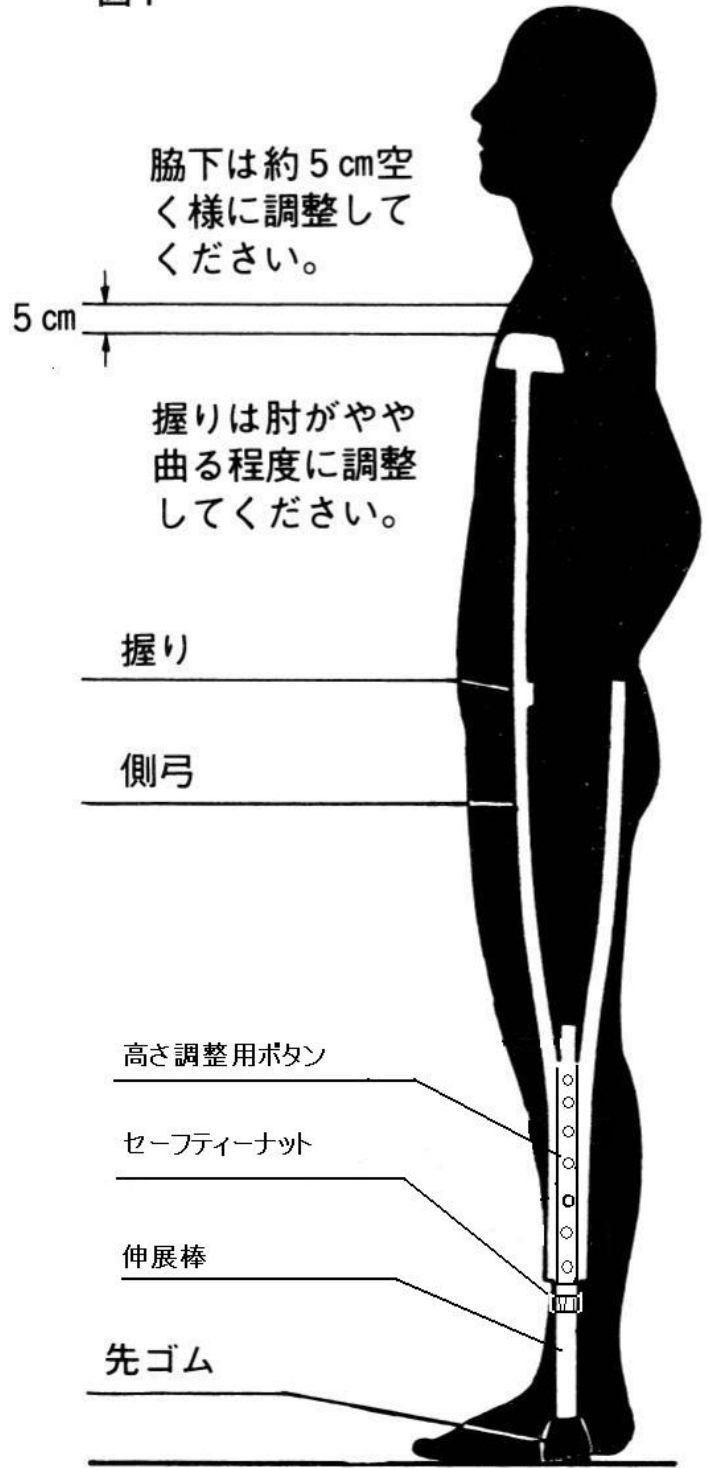


図2

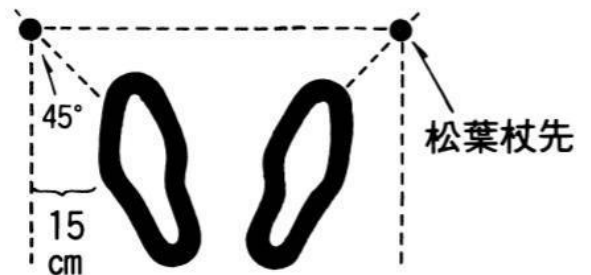

株式会社 赤井

〒558-0011 大阪市住吉区菟田8丁目11番19号
お問い合わせ、御相談はお客様相談室 06-6608-0562