

ポータブルケイン伸縮型スリム 取扱説明書

この度は、携帯用ステッキをお買い求め下さりまして誠にありがとうございます。
下記の取扱説明をお読み下さりまして、正しく御愛用下さいますようお願い申し上げます。

*******必ずお読み下さい*******

製品に貼り付けてあるSGマークは、購入から3年間、製品安全協会が保証する被害者救済制度の保証をする印しですので製品からはがさないで下さい。

剥れた場合も製品にテープ等で固定しておいてください。SGマークに関して詳しくは、裏面をお読み下さい。

★この取扱説明書は大切に保存してください。★

【特徴】

- ◆ アルミニウム軽合金製で軽くて丈夫です。
- ◆ パイプの表面は丈夫な電解発色加工を施してあり色褪せがなく、傷つきにくいです。
- ◆ 持ち運びに便利な折り畳み式です。
- ◆ 5段階に長さ調節が出来ます

【寸法調整の方法】

1. セーフティナットを緩めます。
 2. 長さ調整ボタンを押し込みながら支柱を出し入れして長さを調整します。
(図A参照)
 3. 調整後、ボタンがボタン穴からキッチリと突出している事を確認してください。
 4. セーフティナットを締めます。
- ◆ ボタンの伸縮の範囲以上に短くしたい場合や、ボタンの間隔の途中の長さに調節したい場合は、杖の先ゴムを抜いて最先端をパイプカッターや金鋸で切断してください。調節後、先ゴムをはめて下さい。

【正しい寸法の決め方】

- ◆ 杖先を握り手と同じ側の足先 外約20cmに置き、肘が30~40度屈曲した状態が適当な長さの目安です。
- ◆ 正しい寸法については医師や、各種療法士等の専門アドバイザーの方にご指導を仰いでください。(図B参照)


【製品の規格】

- ◆ 全長80~90cm : 5段階長さ調整
- ◆ 適合する先ゴム : 内径15mm 座金入


【使用上の注意】

- ◆ 上記【正しい寸法の決め方】を参考に身体に合った寸法に調整して御使用下さい。
- ◆ 正しい寸法に調整されずに使用すると、正しく歩行できないばかりか、体に不都合が生じる場合が有りますので、歩行並びに取扱いには医師及び専門のアドバイザーの指導に従ってください。
- ◆ 折り畳んだ状態から伸展する場合はパイプの継ぎ目に指等を挟まないように注意してください。
- ◆ 使用前に、長さ調整ボタンがきちんと突出している事を確認してください。又、握りにガタ付が無い、先ゴムがきちんと装着されているか各部を点検してください。
- ◆ 握りにガタつきが有る場合は使用を中止してください。
- ◆ 中ゴムの劣化や損傷でパイプがしっかり固定されずにガタつく場合は使用を中止してください。
- ◆ その他、異常音や不都合が生じた場合は使用を直ちに中止して専門家に点検してもらってください。
- ◆ 先ゴムが破れたり摩耗したりしている場合は、サイズの合った新しい先ゴムと交換してください。(先ゴムはきちんと底まで差し込んで装着してください。)
- ◆ 滑りやすい路面での使用は、十分注意してください。
- ◆ ストーブの近くや、夏場の自動車の中等の高温になる場所は、中ゴムが劣化しやすくなるので避けてください。
- ◆ 用途以外(登山・護身用)に使用しないでください。
- ◆ 1人専用の目的のもので、多人数で使用しないで下さい。
- ◆ 使用後の手入れについては特に注意はありませんが、きれいに清掃してしまってください。但し、長時間使用しない場合は、伸ばした状態で高温にならない場所に保管してください。

図A

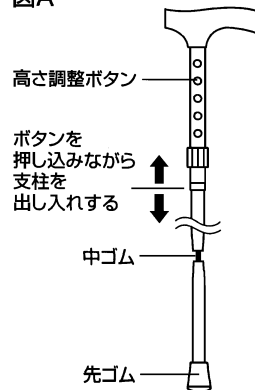

図B

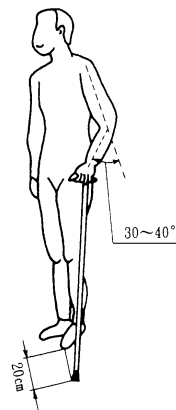

株式会社 赤 井

〒558-0011 大阪市住吉区菟田 8 丁目 11-19

お問い合わせ、御相談は TEL:06-6608-0562

FAX:06-6608-1621